

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 10 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Monitorização de Solução de Ácido Peracético 2% Executante: Enfermeiro e/ou Técnico de enfermagem Frequência: Quando necessário		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado: 1. Monitorização da Concentração Mínima Eficaz (MEC) do Ácido Peracético. 2. Garantir segurança dos artigos processados na solução.
Recursos Necessários: 1. EPI 2. Tiras testes reativas compatíveis com fabricante.
Atividades: 1. Lavar as mãos; 2. Reunir material necessário (EPI, Fitas Testes); 3. Calçar luvas de procedimento, colocar luvas de proteção e máscara; 4. Retire uma fita do frasco e feche novamente o mesmo com firmeza; 5. Colocar a data no frasco quando foi aberto; 6. Faça a imersão da zona de reação da tira na solução de ácido peracético 2% ativada, durante um (1) segundo e retire-a imediatamente. Não deixe a tira na solução nem agite enquanto ela estiver. 7. Deixar que escorra o excesso de líquido pela borda longitudinal da tira sobre um papel absorvente. Não agitar a tira teste. 8. Após 30 segundos , comparar a zona de reação com padrão no frasco; 9. Classificar a cor da zona reativa com o padrão do frasco; 10. Se a cor da reação for compatível com a coloração de 2%, a solução poderá ser utilizada ou reutilizada. Obedecendo os padrões estabelecidos aos níveis MEC estabelecidos. 11. Não ficar realizando leitura após o tempo estabelecido, podendo a mesma alterar coloração causando falsas interpretações. 12. Realizar o teste a cada 07 dias. 13. Mantenha as fitas de ácido peracético na embalagem original. Com a tampa bem fechada.
Cuidados Especiais: Observar características como: coloração e resíduos. Em caso suspeito fazer o teste mesmo dentro do prazo estabelecido
Referências Bibliográficas: 1. Merckoquant 2. PERAX RIO

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Data e assinaturas:

