

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CME 06 Página 1/1

Emissão: 06/07/2015

Revisão:

Tarefa: Recepção do material instrumental no expurgo para limpeza

Executante: Técnico de enfermagem

Frequência: Semanalmente N° 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

## Resultado Esperado:

Adoção da técnica correta para a devida limpeza do material

## **Recursos Necessários:**

- 1. Recipiente plástico;
- 2. Esponjas macias;
- 3. Escovas de cerdas macias;
- 4. Detergente enzimático;
- 5. Máguina Termodesinfectadora;
- 6. Compressas limpas;
- 7. E.P.I 's (gorro, luvas de cano longo, avental impermeável, máscara N95 e óculos de proteção).

## Atividades:

- 1. Higienizar as mãos;
- 2. Paramentar-se com os EPI'S;
- 3. Certificar da ausência de material perfurocortante e se necessário proceder o descarte adequado;
- 4. Conferir o material;
- 5. Separar as pinças de ponta traumática e lavar separadamente para evitar traumas;
- 6. Diluir o detergente no recipiente de plástico conforme a orientação do fabricante;
- 7. Imergir os instrumentos abertos na solução e deixar agir conforme orientação do fabricante;
- 8. Colocar os instrumentais na máquina termodesinfectadora;
- 9. Ligar o ciclo da máquina e aguardar seu término;
- 10. Retirar todo material da máquina e fazer revisão observando sujidade, quebras e rachaduras;
- 11. Enviar para a área de preparo.

Cuidados Especiais: Comunicar ao enfermeiro para substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos; Na ausência da máquina lavadora ultrassônica e/ou termodesinfectadora, realizar a lavagem manual dos instrumentais, utilizando escovas ou esponjas, atentando para junções e cremalheiras; enxaguar abundantemente com água corrente; secar os instrumentos com auxílio da compressa.

**Referências Bibliográficas:** Enfermagem em Centro de Material e Esterilização.Kazuko Uchikawa Graziano, Arlete Silva e Eliane Molina Psaltikidis.Barueri, SP:Manole, 2011.

·Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem	
Carimbo e assinatura:	