

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 09 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Utilização do Detergente Enzimático Executante: Enfermeiro e/ou Técnico de enfermagem Frequência: Quando necessário		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado: Limpeza e remoção de sujidade
Recursos Necessários: 1. Recipiente de plásticos 2. Becker graduado 3. Detergente Enzimático 4. EPI (gorro, luva cano longo, avental impermeável, máscara e óculos
Atividades: 1. Higienizar as mãos. 2. Verificar modo de diluição, 2 ml para cada litro de água. 3. Verificar Prazo de validade e tempo de imersão de acordo com fabricante. 4. O detergente deve ser compatível com material processado e registrado no Ministério da Saúde. 5. Verificar se todas as pinças estão abertas e os materiais desmontados. 6. Colocar toda superfície do material em contato com a solução, observando o tempo de exposição. 7. Realizar exangue de forma abundante. 8. Desprezar o material segundo PGRSS. 9. Retirar os EPI ao término das atividades. 10. Higienizar as mãos
Cuidados Especiais: 1. Os detergentes não dispensam a ação mecânica por meio de fricção com uso de escovas e esponjas. 2. É fundamental a abertura de pinças e desmontagem de materiais complexos. 3. A solução deverá ser trocada a cada uso.
Referências Bibliográficas: 1. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Kazuko Uchikawa Graziano, Arlete Silva e Eliane Molina Psaltidis. Barueri, SP: Manole , 2011. 2. Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Data e assinaturas: